



## INSTRUCCIONES RAPIDAS



Version 1.0

Controle

Instruction

Date:

Name:

Seen



### Puño de mando izquierda

- 1 - Interruptor marcha Adelante / Atrás
- 2 - Intermitentes
- 3 - Klaxon



### Puño de mando derecha

- 4 - Interruptor Alimentación / Urgencia
- 5 - Interruptor sonido de conducción on / off
- 6 - Botón Start / Stop



Maneta freno trasero

Liberación freno motor\*


### Puño Izquierdo



Maneta freno delantero

Puño de aceleracion

### Puño derecho

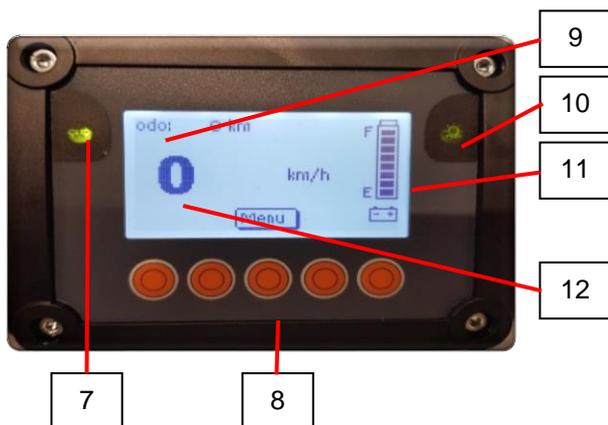

- 7 - Indicador de dirección
- 8 - Botones de programación
- 9 - Total km recorrido / conta km
- 10 - Indicador de luces
- 11 - Indicador de carga de la batería
- 12 - Velocidad

**\*Atención!!! Deje siempre el gatillo de liberación del freno motor en la posición desbloqueada. Utilice el gatillo de liberación en la posición bloqueada solo en caso de emergencia y fallo de alimentación, para desbloquear el freno del motor y evacuar el vehículo.**

**Nunca conduzca con un freno liberado manualmente, esto puede dañar el freno y el motor.**



## Inicio

- 1 - Colóquese en Virto2
- 2 - Interruptor de alimentación (4) **ON**.
- 3 - Pulse el botón **START** (6).
- 4 - Desbloquear Virto2 con la contraseña o la llave Bluetooth.

## Conducción

- 1 - Mantenga ambas manos en el manillar
- 2 - Acelere lentamente a la velocidad deseada.
- 3 - Tome turnos a la velocidad adecuada.

## Aparcamiento

- 1 - Parque Virto2 en plano.
- 2 - Apague el interruptor Virto2 (6) **STOP**.
- 3 - Interruptor de alimentación (4) **OFF**.



La carga máxima en el Virto2 es de 125 kg conductor incluido.  
El maletero y el porta equipajes de peso máximo están a 15 kg.




En caso de emergencia se puede apuyer en el interruptor de encendido (4) mientras se conduce, el Virto2 se detiene y el freno del motor se activa.  
**Atención !!!** Esta acción solo se recomienda en caso de emergencia.



No conduzca en charcos y evite carreteras o subidas del 10%.  
Evita los obstáculos que podrían dañar Virto2.

## Cargar batería

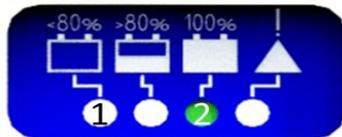

### Conectar el cargador

1. Interruptor de alimentación (4) **OFF**
2. Conectar el cargador a la red LED-1 naranja se enciende
3. Conectarse al Virto2 enchufe A

(Desconectarse en el orden inverso)

### Luces LEDS

LED 1– Naranja – Conectado a la red  
LED 1– Naranja – Cargando  
LED 2– Verde – Carga completada



Cuando el indicador de batería muestra sólo 2 líneas, debe cargarse lo más rápido posible. No siga conduciendo hasta que el Virto2 se apague automáticamente, ya que esto puede dañar las baterías.



Cargue el Virto2 solo con el cargador de batería suministrado.