




VIRTUO 2

Quick Manual

Version 1.0

Bedieningselementen

Instructie	Datum:
Naam:	
Gezien	

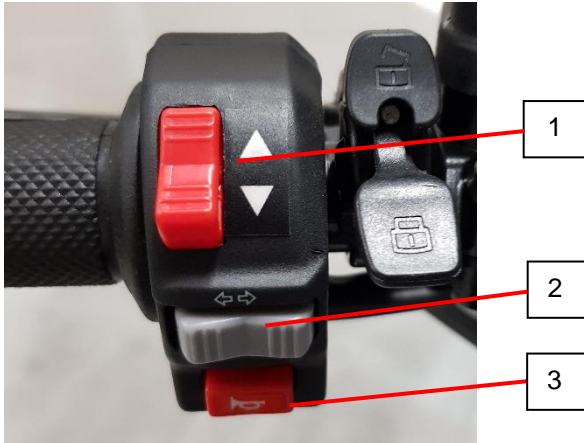


Bediening – Linker stuurschakelaars

1. Voor-/achteruit schakelaar
2. Richtingaanwijzer links/rechts
3. Claxon



Bediening – Rechter stuurschakelaars


4. Hoofdstroom/ noodknop
5. Rijgeluid vooruit aan/uit
6. Start/Stop knop

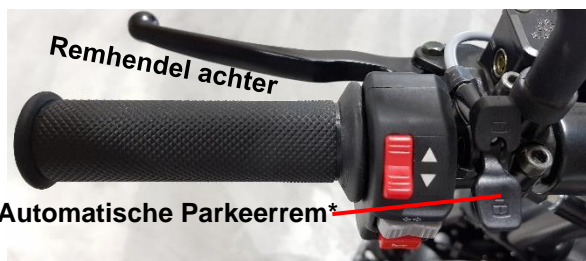

Stuur – Linker handvat



Stuur – Rechter handvat

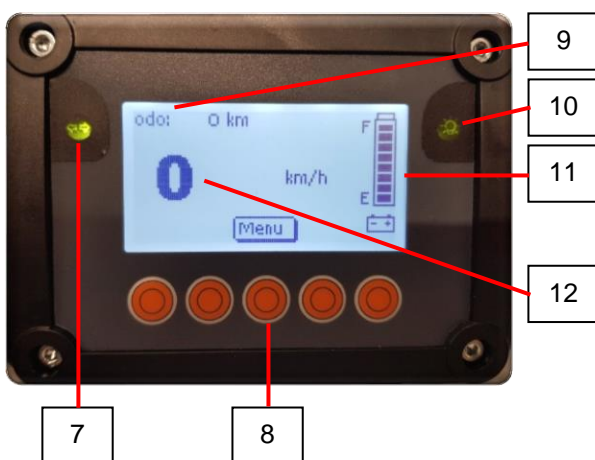

7. Richtingaanwijzer indicator
8. Knoppen
9. Totaal gereden en rit km's indicator
10. Verlichting indicator
11. Batterij indicator
12. Snelheid

*** Let op!** Laat standaard de parkeerrem in de unlocked positie staan. Zet de schakelaar alleen in locked positie in het geval van een noodsituatie. Rij nooit met een handmatig vrijgegeven rem, dit kan schade toebrengen aan de rem en de motor.

Opstarten

1. Stap op de Virto2.
2. Schakel de hoofdstroom (4) aan.
3. Druk op de startknop (6).
4. Unlock de Virto 2 met een wachtwoord of middels bluetooth.

Parkeren

1. Parkeer de Virto2 op een vlakke ondergrond.
2. Schakel de Virto2 uit (6).
3. Schakel de hoofdstroom (4) uit.



De Virto2 mag tot een maximum van 125 kg beladen worden dit is inclusief berijder. Het maximale gewicht voor in het bagage compartiment en op de bagage drager bedraagt 15 kg.



In geval van nood kan tijdens het rijden de hoofdstroomschakelaar (4) worden gebruikt als noodrem. De totale Virto2 wordt uitgeschakeld en de motorrem wordt direct geactiveerd. Let op! Gebruik deze **alleen** in geval van nood.



Rij niet in plassen en vermijd wegen en hellingen met een hellingshoek groter dan +10%. Vermijd obstakels, deze kunnen de Virto2 beschadigen.

Rijden

1. Houd beide handen aan het stuur.
2. Versnel langzaam naar de gewenste snelheid.
3. Leun mee in de bochten met gepaste snelheid.
4. Rem altijd met beide remmen.

Opladen



Laden met standaard lader

1. Hoofdstroom schakelaar (4) OFF
2. Plug de stekker in het stopcontact LED-1 licht oranje op
3. Koppel plug A aan de Virto2

(Afkoppelen in omgekeerde volgorde)

LEDS op standaard acculader

- LED 1– Oranje – Verbonden met netstroom
LED 1– Oranje – Laden in gang
LED 2– Groen – Volledig opgeladen



Wanneer de batterij indicator nog maar 2 streepjes aangeeft, moet deze z.s.m. worden opgeladen. Rij **niet** door totdat de Virto2 automatisch uitgaat, dit kan de accu's beschadigen.



Laad de Virto2 alleen op met de meegeleverde acculader.